

# 毎日のことだから 患者さんにやさしさを ワンタッチペン

オレンジボタンでさらに使いやすく

採血用穿刺器具  
(先端ディスポーザブルタイプ\*1)

ワンタッチペン

単回使用自動ランセット  
ワンタッチペンランセット

## “操作性”が 向上しました

- ボタン等の可動部位をオレンジ色などの分かりやすいカラー表示とし、操作や指導が容易
- 穿刺器具は持ちやすく、穿刺針はつかみやすい設計

## “痛み”を 軽減します\*2

- 穿刺針の直進性を向上させる工夫や、針ブレを少なくすることで、穿刺時の痛みを軽減
- 指先より痛みの少ない手のひらからの採血も可能

## “安全性”を 高めました\*2

- 誤穿刺・感染防止のための安全性を考慮して、一度使用した針は再使用ができない設計
- 操作手順の間違いを防ぐ構造

# ワンタッチペンは、使いやすい、痛みが少ない。<sup>\*2</sup>

## ●操作性の向上

可動部分を分かりやすいオレンジ色とし操作性を向上させています。


針が装着されるとオレンジ色に変わる確認窓や、オレンジ色の穿刺ボタンなど、可動部位をカラー表示して、操作や指導を行いやすくしています。




## ●痛みの軽減<sup>\*2</sup>

針の直進性を向上させるとともに針ブレを少なくすることで痛みの軽減に貢献しています。

穿刺針は30Gと細く、また穿刺針を支える「レールガイド」と「サポートガイド」、さらに透明ケースとレールガイドとの間が約0.1mmと密着しているため、針の直進性を向上させています<sup>\*2</sup>。

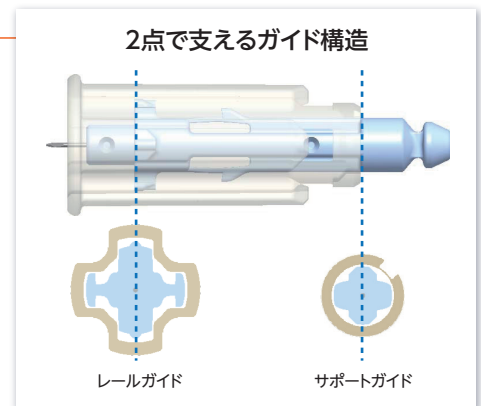

高速撮影した穿刺軌道を重ね合わせると、従来型の穿刺器具に比べて、ワンタッチペンの針ブレが少ないことが分かります。これにより痛みの軽減につながっています。患者さんにも指導するスタッフにも、うれしい工夫です。

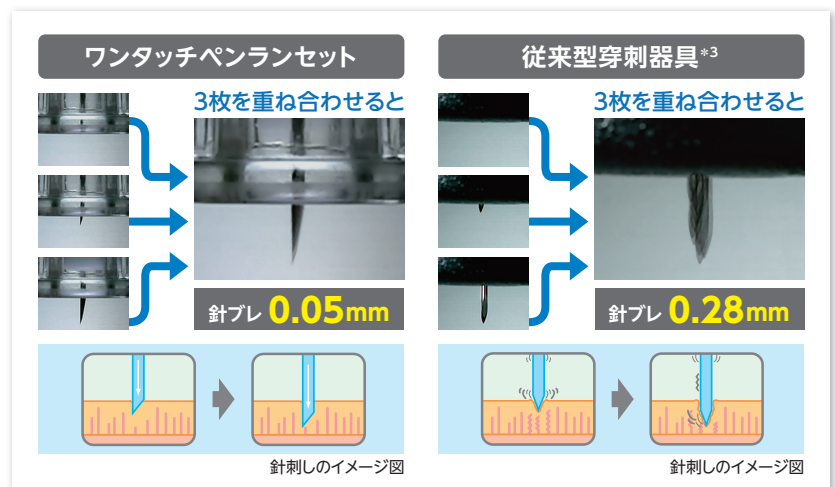

## ●安全性の向上<sup>\*2</sup>

再穿刺・再使用を防ぐことにより誤穿刺・感染防止のための安全性を向上させています。

一度穿刺した針は再穿刺できません。廃棄後はロック構造により、ケースの奥に針が固定され、使用済みの針の誤使用を防ぎます。



<sup>\*2</sup>: ワンタッチウルトラソフトとの比較(自社調べ) <sup>\*3</sup>: ワンタッチウルトラソフト(針の周辺部分がディスプレイタイプでないもの)

販売元

LifeScan Japan株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4  
OVOL日本橋ビル2F  
<https://www.onetouch.jp>

ワンタッチウルトラソフト(届出番号:13B1X10312000001)  
ワンタッチウルトラソフト ランセット(承認番号:21500BZY00001000)  
製造販売元:  
LifeScan Japan株式会社  
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル2F

ワンタッチペン(届出番号:33B2X00002000003)  
ワンタッチペンランセット(認証番号:221AFBZX00044000)  
製造販売元:  
株式会社旭ボリスライダー  
岡山県真庭市三崎860-2

●製品をお使いの前に添付文書を必ずお読みください。

製品についてのお問い合わせは弊社担当営業、または右記ワンタッチコールセンターまでご連絡下さい。

ワンタッチコールセンター **0120-113-903**

**24時間365日**

携帯電話・PHSからでもかけられます。