

BD™ セーフティ ランセット

微量採血用穿刺器具

BD Microtainer®

Contact-Activated Lancet



Feel the **Comfort**

See the **Accuracy**



Helping all people
live healthy lives



BD™ セーフティ ランセット

穿刺器具と穿刺針を一体化した、完全ディスポーザブルタイプのランセットです。

より持ちやすく

- 人間工学に基づき使いやすい形と大きさを追求して設計されました。
- 持ちやすく、滑りにくくデザインされたホルダーが、確実な穿刺を可能にします。

より簡単に

- キャップを外し、ホルダーの先端を皮膚に押し付けるだけで作動します。
- 針の交換や煩雑な操作が不要で、誰でも簡単に穿刺できます。

より正確に

- 皮膚に触れる部分が狭いので、容易に穿刺部位を確認できます。
- 安定した穿刺深度を確保できるよう、皮膚に押し付けた時にのみ作動します。

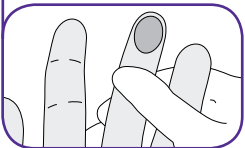
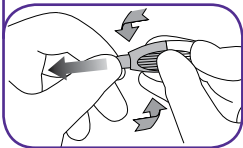
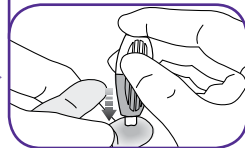
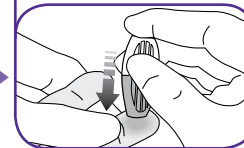
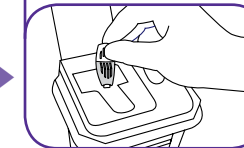
より安全に

- 針（刃）は穿刺直後に自動的にホルダー内に格納され、針刺し損傷を防ぎます。
- 再使用できない構造で、使い回しによる交差感染を防止します。

BD セーフティランセット						
カタログ番号	ホルダーカラー	ランセットタイプ	穿刺の深さ	使用例	パッケージ	
23846		パープル	30ゲージ 針	1.5 mm	血糖値測定	30個/箱
23870		パープル	30ゲージ 針	1.5 mm	血糖値測定	200個/箱

販売名：BD セーフティ ランセット
医療機器承認番号 21900BZX00737000

使用方法

- 1** 穿刺部位を消毒します。

- 2** 保護キャップをねじって引っ張り、ホルダーから取り外します。

- 3** ホルダーを指で保持し、穿刺部位周辺を圧迫し、皮膚を張らせた状態で、ホルダーの先端を穿刺部位に押しあてます。
(この時ホルダーの先端が少し引っ込みます。)

- 4** 作動音がするまでさらに押し付け、すぐに離します。

- 5** すみやかに廃棄容器に廃棄します。


*BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが保有します。©2009 BD



製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1
BDプレアナリティカルシステム事業部
本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
www.bd.com/jp/

【販売元】
LifeScan Japan株式会社
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル2F

ワンタッチコールセンター
0120-113-903

24時間365日

携帯電話・PHSからでもかけられます。