

ピンキーセーフティランセット

Pinky Safety Lancet

NEW



測定に、確かなアプローチ



血液の採取



単回使用で衛生的




シンプル操作

患者さんへの負担は少なく、一度で確実に必要な血液量を採取したい。

測定結果は、できるだけ正確に。そして治療に活かしたい。

ピンキーセーフティランセットは、看護師と患者さんの気持ちに測定の“確かさ”で応えたい。

使用方法

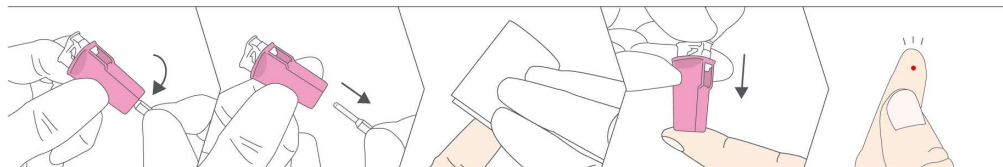

保護キャップを
ねじ切る

保護キャップを
取り外す

採血部分を消毒し
乾燥させる

採血部位に押し当て
穿刺ボタンを押す

採血部位から
血液を採取

ONETOUCH™

測定に、確かなアプローチ



血液の採取

十分な血液を
確保するためのデザイン

効率的な採血のために
針の太さと深さを考慮



単回使用で衛生的

単回使用構造で
針の再穿刺を防止

使い捨てのため
感染リスク軽減



シンプル操作

保護キャップをねじ切り
ボタンを押すだけ

使い方がシンプルで
迅速な測定

ニーズに応える製品特長



Q.1 患者さんにとって「良い」と思う
穿刺器具の条件は何ですか？

- 1 痛みが少ない*
- 2 操作のステップが少ない
- 3 血糖測定に十分な血液量の採血
- 4 失敗するケースが少ない

潜在ニーズ

- 失敗したくない…
- 何度も穿刺したくない…
- 血液が出にくい…
- 測定を短時間で終えたい…

POINT! **確実性**

Q.2 穿刺器具に求めることで特に
大切だと思うことは何ですか？

- 1 痛みが少ない*
- 2 操作のステップが少ない
- 3 血糖測定に十分な血液量の採血
- 4 失敗するケースが少ない

※Q1, Q2: Webアンケート調査 糖尿病診療に携わる看護師100名

*痛みの少なさを目指したデザイン ▶ 30G

検査室と
同等の精度*



シンプル
確実

スタットストリップと
ピンキーセーフティランセットの使用で、
測定に確かなアプローチ

*Kost GJ, Tran NK, Louie RF, Gentile NL, Abad VJ. Assessing the performance of handheld glucose testing for critical care. Diabetes Technol Ther. 2008 Dec;10(6):445-51.

製品をお使いの前に添付文書を必ずお読みください。製品についてのお問い合わせは、担当営業、または下記までご連絡ください。

■製品仕様

製品名	ピンキーセーフティランセット
針の太さ	30G
針の包装単位	30本/箱

●販売名:ピンキーセーフティランセット
 認証番号:302AFBZX00041000 管理医療機器 単回使用自動ランセット
 【製造販売元】株式会社旭ボリスライダー 岡山県真庭市三崎860-2
 □販売元 LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目4-4 OVOL日本橋ビル2F

●販売名:スタットストリップ エクスプレス グルコース ケトン
 届出番号:13B1X10094005013 一般医療機器 特定保守管理医療機器 乾式臨床化学分析装置
 【製造販売元】/パ/バイオメディカル株式会社 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル
 □販売元 LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目4-4 OVOL日本橋ビル2F

ワンタッチコールセンター

0120-113-903

24時間365日

携帯電話・PHSからでもかけられます。

LifeScan Japan株式会社

東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル2F